

Gymna Cryoflow ICE-CT

Cryothérapie avec système de feedback infrarouge pour un contrôle optimal de la température



gymna[®]

gymna.com

Gymna Cryoflow ICE-CT

Efficacité prouvée en vue d'une rééducation plus rapide en présence d'un traumatisme aigu

La cryothérapie est utilisée depuis des siècles. Ses avantages ont aujourd'hui été étayés par des arguments scientifiques. La douleur est limitée par un ralentissement de la conduction nerveuse, le processus inflammatoire est ralenti par une inhibition des réactions métaboliques et enzymatiques et les spasmes musculaires sont réduits grâce à un abaissement de l'activité des récepteurs musculaires.



ATTÉNUATION DE LA DOULEUR

1
Moindre recours à une
médication antidouleur

Possibilités de traitement
plus efficaces

INHIBITION DE L'INFLAMMATION ET LIMITATION DE LA TUMÉFACTION

2
Évite une rééducation
prolongée

Permet une reprise plus
rapide des activités

RELAXATION MUSCULAIRE

3
Amélioration des étirements
musculaires grâce à la
réduction des spasmes

Amélioration de l'ADM

= Rééducation plus rapide




Davantage d'applications : spasticité, patients souffrant de rhumatismes, traitements pré/postopératoires, arthrose, récupération après un effort, thérapie 'trigger point', après amputations, ...

Système
de feedback
infrarouge
UNIQUE!

Gymna Cryoflow ICE-CT

Contrôle optimal de la température

Le Gymna Cryoflow ICE-CT dispose d'un système de feedback infrarouge unique permettant un réglage optimal de la température, ce qui garantit un résultat maximal.

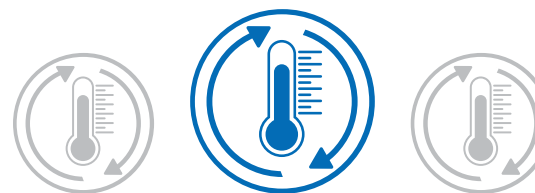

SYSTÈME DE FEEDBACK INFRAROUGE UNIQUE

- **Mesure constante** de la température de la peau par une sonde infrarouge
- **Le débit d'air** est adapté **automatiquement** afin d'obtenir et de maintenir la température souhaitée
- **Résultat maximal :**
 - Éviter les températures trop élevées, donc effet 0
 - Éviter les températures trop basses et donc les risques de lésions dues au gel et de nerfs endommagés



DÉBIT D'AIR PUISSANT

La température de la peau chute à 12° C en l'espace de 1 minute afin d'initier immédiatement les réactions métaboliques souhaitées



Traitement de brève durée grâce à l'obtention rapide des températures suffisamment basses



Effet de compression, offre des applications de traitement supplémentaires comme le drainage lymphatique par la combinaison du balayage et de la compression

Gymna Cryoflow ICE-CT

La cryothérapie appliquée de façon très efficace et simple

LE GYMNA CRYOFLOW ICE-CT EST ÉQUIPÉ DE SOLUTIONS INTELLIGENTES GARANTISSANT VOTRE CONFORT :



Méthode de traitement dynamique



35 réglages préprogrammés sur la base d'indications ou d'objectifs



Facile d'utilisation, pas de recharges



Thérapie de brève durée grâce à une chute rapide de la température



Différents buses en fonction de la zone à traiter



2 méthodes de traitement : statique et mains libres ou dynamique et manuel



Méthode de traitement statique

Différents buses :

Buse de **5 mm**



Ponctuel pour le traitement de 'trigger points' ou de points de douleur

Buse de **15 mm**



Refroidissement local

Buse de **20 mm**



Refroidissement local de plus grandes surfaces

NOUVEAU

Gymna Physio Care

Des lotions de massage professionnelles
de qualité supérieure



Cryothérapie



Diathermie



Thérapie par ondes de choc



Physio Care



Tables de massage



Électrothérapie



Active Motion



Votre distributeur

gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89 510 511